

FOMADENT

SOUPRAVA VÝVOJKY A USTALOVAČE PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ ZUBNÍCH RADIOGRAFICKÝCH FILMŮ

Charakteristika

Souprava FOMADENT obsahuje kapalným koncentrát vývojký FOMADENT D a rychloustalovače FOMADENT F pro ruční zpracování zubních radiografických filmů FOMA – DENTIX a srovnatelných výrobků jiných výrobců.

Pracovní roztoky se připravují ředěním koncentrátů vodou.

Vývojka FOMADENT D je jednosložkový koncentrát pro přípravu vývojký k ručnímu zpracování zubních radiografických filmů. Vývojka zaručuje vysokou kvalitu obrazu, vyznačuje se zvláště jemným zrnem a dobře vyváženým kontrastem. Plně využívá citlivosti filmu. Složení vývojký zaručuje její dlouhodobou stabilitu, zabraňuje tvorbě usazenin při použití tvrdé vody.

Rychloustalovač FOMADENT F je jednosložkový koncentrát na bázi thiosíranu amonného pro přípravu ustalovače pro ruční ustalování zubních radiografických filmů. Vyznačuje se vysokou ustalovací rychlostí a účinností, silnou pufrační schopností a dlouhodobou stabilitou.

Adjustace

Souprava FOMADENT obsahuje:

- koncentrát vývojký FOMADENT D, 4x 250 ml pro přípravu 4x 1 litr pracovního roztoku vývojký
- koncentrát rychloustalovače FOMADENT F, 4x 250 ml pro přípravu 4x 1 litr pracovního roztoku ustalovače.

Koncentráty jsou dodávány v plastových obalech.

Příprava lázní

Příprava pracovního roztoku vývojký:

Koncentrát vývojký FOMADENT D (objem 250 ml) se doplní vodou na 1 litr pracovního roztoku vývojký.

Příprava pracovního roztoku rychloustalovače:

Koncentrát rychloustalovače FOMADENT F (objem 250 ml) se doplní vodou na 1 litr pracovního roztoku ustalovače.

Zpracování

Doporučené standardní podmínky vyvolávání

Teplota °C	Čas (min)
20	5
22	4
24	3,5

Tank s vývojkou je vhodné uzavřít víkem.

Doporučené standardní podmínky ustalování

Teplota °C	Čas (min)
20	2
24	2

V případě potřeby si vyžádejte odbornou pomoc techniků firmy FOMA.

Skladování

Lázně musí být skladovány v originálním balení na suchém místě při teplotách +5 až +25 °C, max. doba skladování je 24 měsíců od data výroby. Doba používání jednoho nasazení pracovních roztoků je 3-4 týdny.

Informace o ekologické likvidaci, zásady bezpečného použití při dopravě, skladování a manipulaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.